

Эластомерные слепочные материалы PERFIT

Порядок работы с вязким слепочным материалом PERFIT



1 Возьмите био-картридж



2 Снимите крышку с био-картриджа, выбросите крышку, вместо нее можно использовать смеситель после того, как будет снят оттиск.



3 Выдавите вязкий слепочный материал на ложку, убедитесь, что смеситель погружен в слепочный материал во избежание появления пузырьков.



4 Снимите оттиск.

Вставьте оттискную ложку с вязким слепочным материалом в ротовую полость пациента, медленно, одним точным движением установите ее на место. Через 3 минуты материал полностью затвердеет, ложку можно вынуть.

